




НПТЭГ «МЕДНОРД»

Первый запуск и автокалибровка

1. Перед запуском прибора и программного обеспечения, убедитесь в том, что прибор подключен к сети 220V и соединен с компьютером через USB-порт.
2. Нажмите кнопку включения на задней панели прибора.


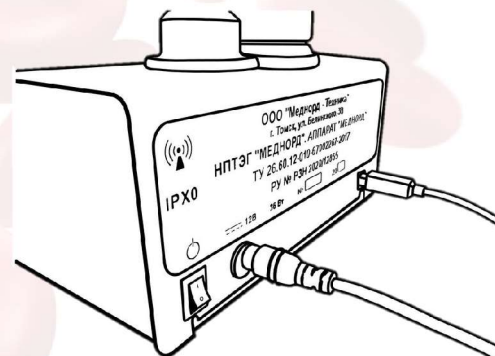


3. На лицевой панели нажмите кнопку включения термостата - кнопка «Он».

4. Убедитесь, что начался нагрев термостата (повышается температура на дисплее аппарата).

5. Поднимите датчик, затем поверните его на себя. Убедитесь, что датчик зафиксирован.

6. Заполните кювету водой до риски. Поместите кювету с водой в термостат аппарата.

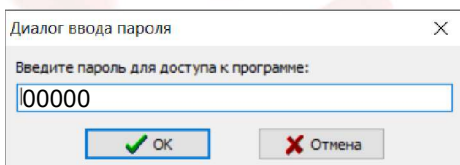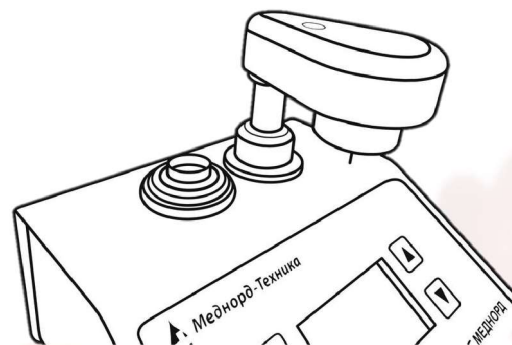

7. Запустите программное обеспечение. На рабочем столе расположен ярлык «Гемо-5». Введите пароль «00000».

8. Откройте вкладку «Калибровка и тестирование» и запустите автокалибровку.

 Автокалибровка



9. При появлении уведомления «Опустите датчик в воду» поверните датчик от себя и опустите его в воду.

ООО «МЕДНОРД-Т»

По вопросам приобретения оборудования:
E-mail: info@mednord-t.ru
Тел./ф.: 8 (3822) 52-75-22



НПТЭГ «МЕДНОРД»

Проведение исследования

1. Внимание! Новое исследование проводится после калибровки прибора. Перейдите во вкладку «Пациенты» и выберите пациента для исследования. Если пациента нет в базе данных, то внести в базу данных его можно путем нажатия на пиктограмму «Добавить пациента».

2. Заполните необходимые поля и нажмите «Сохранить».

Убедитесь, что во вкладке «Пациенты» черная стрелка указывает на выбранного вами пациента.

Добавить пациента

Фамилия: _____ Имя: _____ Отчество: _____

Пол: Женский Дата рождения: 01.01.1990 История болезни: _____

Код осн. заболевания: _____ Код доп. заболевания: _____

Основное заболевание: _____ Дополнительное заболевание: _____

Сохранить Отмена

Программа контроля свёртываемости крови Гемо 5 - [Список пациентов]

Фамилия	Имя	Отчество	Пол	Дата рождения	Возраст	История болезни	Код
Беременные			жен	12.07.2008	13.7 лет		
Гиперкоагуляция			жен	12.07.2008	13.7 лет		
Гипокоагуляция			муж	12.07.2008	13.7 лет		
Условно	Здоровый	Пациент	муж	12.07.2008	13.7 лет		



3. Подготовьте все необходимое для забора крови (спиртовая салфетка, инсулиновый шприц, кювета). Убедитесь, что на дисплее прибора температура - 37 °C.

4. Поднимите датчик, затем поверните его на себя. Извлеките кювету с водой.

5. Поместите пустую кювету в термостат аппарата.

6. Произведите забор венозной крови в объёме 1,0 ml. Заполните кювету до риски (0,45 ml).

7. Поверните датчик от себя и погрузите его в кровь.

8. Перейдите во вкладку «Новое исследование» → «Запуск исследования» → «Начать». Время от забора крови до начала исследования не должно превышать **10-12 секунд!**

9. После окончания исследования поднимите датчик, поверните его на себя, извлеките и утилизируйте кювету с кровью, а затем **аккуратно** очистите иглу с помощью ватной палочки.

10. Поместите кювету с водой в термостат аппарата, поверните датчик от себя и опустите в кювету.

Выбор параметров нового исследования


Желаете начать исследование крови текущего пациента?

Тест
01.01.1990

Выбор другого Добавить нового

Период исследования:
нет

Начать Отмена

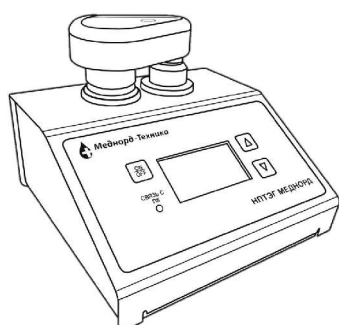

ООО «МЕДНОРД-Т»

По вопросам приобретения оборудования:
E-mail: info@mednord-t.ru
Тел./ф.: 8 (3822) 52-75-22